


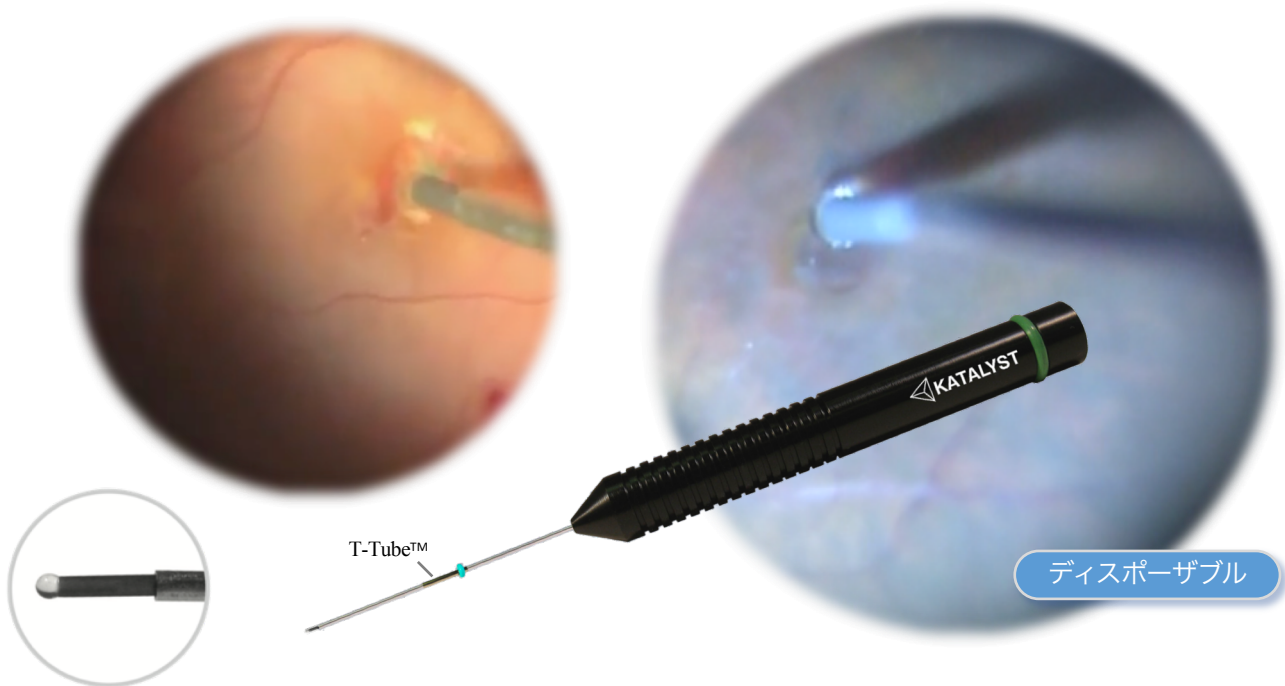

DV1030-25 Maeno-Awhスーパーマニピュレーター・Tチューブ付 25G

柔らかいシリコンチップで優しく膜を撫でることができます。難治性黄斑円孔などの症例で内境界膜自家移植や内境界膜翻転法（Inverted ILM flap technique）などの手技の繊細な内境界膜の操作に役立ちます。

販売名：レチナル ポリッシャー
認証番号：302AFBZI00013000
入数：5本/箱



紹介VTR



円孔へ膜を押し込む





膜を撫でながら捲り上げる



自家移植用の膜を押さえる

【トロカールへの挿入方法】

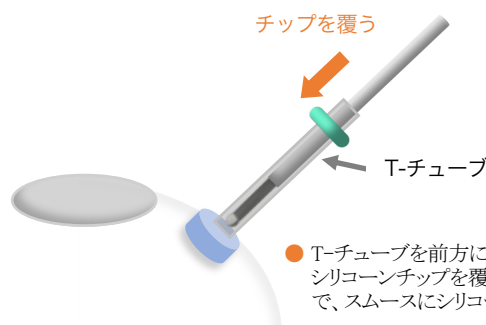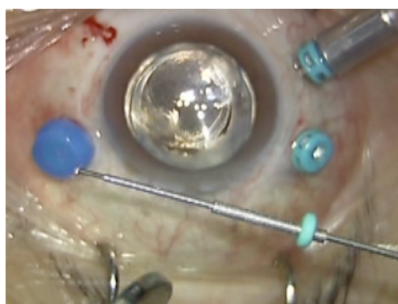

● Tチューブを前方に移動し、先端のシリコンチップを覆います。シリコンチップを覆った状態のままトロカールに挿入することで、スムーズにシリコンチップをトロカール内に挿入できます。