


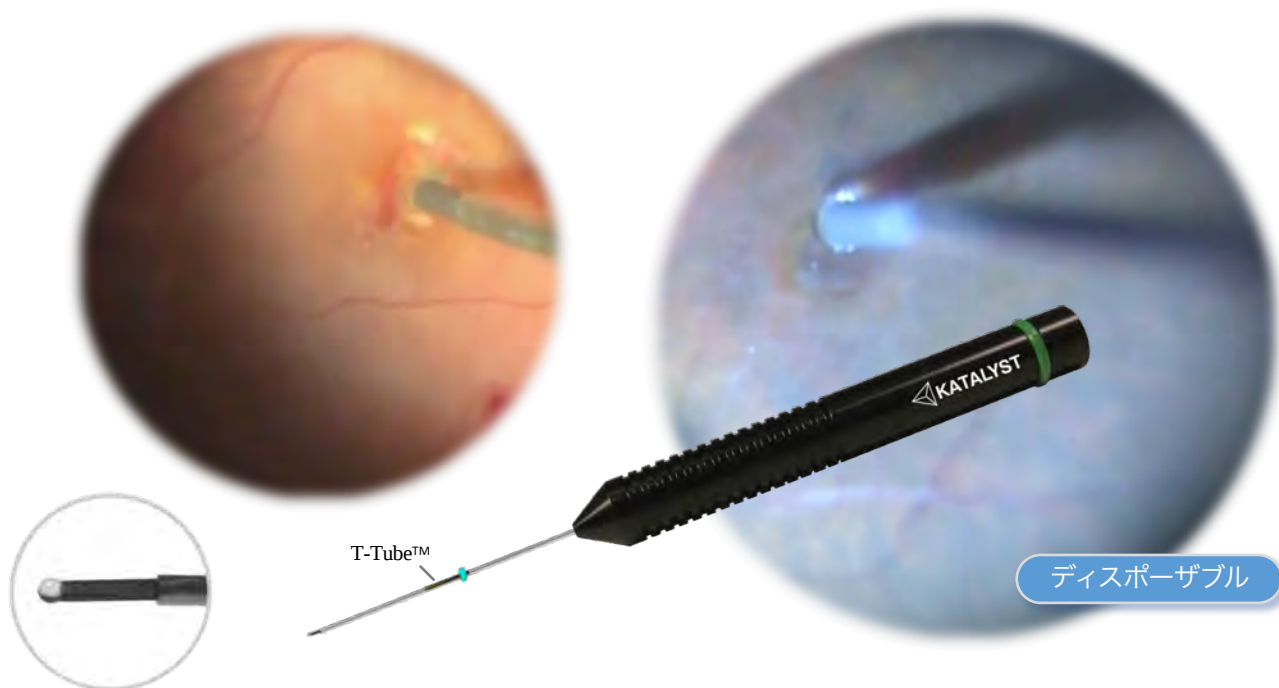

DV1030-25 Maeno-Awhスーパーマニピュレーター・Tチューブ付 25G

柔らかいシリコンチップで優しく膜を撫でることができます。難治性黄斑円孔などの症例で内境界膜自家移植や内境界膜翻転法（Inverted ILM flap technique）などの手技の繊細な内境界膜の操作に役立ちます。

販売名：レチナル ポリッシャー
認証番号：302AFBZI00013000
入数：5本/箱



使用例VTR



円孔へ膜を押し込む




膜を撫でながら捲り上げる



自家移植用の膜を押さえる

【トロカールへの挿入方法】

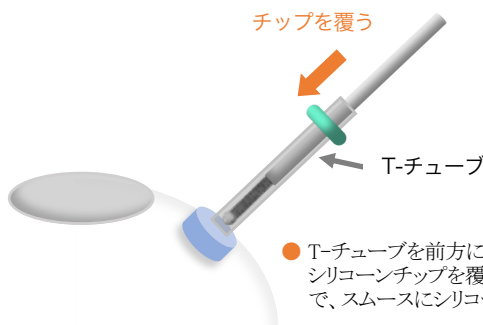

● Tチューブを前方に移動し、先端のシリコンチップを覆います。シリコンチップを覆った状態のままトロカールに挿入することで、スムーズにシリコンチップをトロカール内に挿入できます。

ディスポーザブル



D4176-2 ディスポ アイリス リトラクタ (5本入/2パック)

D4176-5 ディスポ アイリス リトラクタ (5本入/5パック)

販売名: ディスポーザブル アイリス リトラクタ
認証番号: 302AFBZI00012000

※本紙に掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更されることがあります。

NIHON SURGE

日本総代理店及び発売元

有限会社 日本サージ

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町15-11 江坂石周ビル4F

TEL:06-6190-7865 (代) FAX:06-6190-7867

E-mail: customer-support@nihon-surge.com

URL: <https://nihon-surge.com>

第一種医療機器製造販売業許可番号:27B1X00046

2025.09.01